

Til: Praktiserende læger og speciallæger,
der sender prøver ind til Afd. BFG, OUH Odense

Vedrørende analysen B-Sedimentationsreaktion (SR)

Med virkning fra fredag den 5. marts 2010, skifter Afd. BFG, OUH Odense prøvetagningsglas til analysen B-Sedimentationsreaktion (SR). De nye glas er af typen Monosed GE011B. Glas leveres første gang uden bestilling til almen praksis.

Der er ingen ændringer til referenceområder.

Fra og med mandag den 15. marts, vil *alle andre typer* af glas til SR **ikke** blive analyseret på Afd. BFG, OUH Odense, hvorfor I bedes kassere disse.

Glasset trækker 1,28 ml blod. Vær opmærksom på, at rørens lille diameter, gør det vanskeligt at blande indholdet efter prøvetagning. Vend derfor røret langsomt mindst 5 gange fra top til bund, for at undgå koagler.

Som hidtil skal strekkode-etiketten placeres umiddelbart under proppen.

Blod til analysen SR i glastypen Monosed GE011B har en begrænset holdbarhed.

1. Prøver, der er mere end 8 timer gamle mislykkes.
2. Analyseres prøverne inden for 4 timer efter prøvetagning, kan de opbevares ved 4-25 °C.
3. Analyseres prøverne efter 4 til 8 timer efter prøvetagning, skal de opbevares ved 4-8 °C (temperaturkravet gælder **ikke** for praksis, der sender via transportordningen).
4. Prøver skal bringes til stuetemperatur inden analysering.

Fremover vil det være SR-glas af typen Monosed GEO11B, som fremsendes, ved bestilling af SR-glas på depotet, Afd. BFG, OUH Odense.



Charlotte Amtoft Andersen
Faglig Specialist
Tlf. 2942 6269

Susanne Møller Pedersen
Overlæge, dr. med.
Tlf. 6541 2836